



 PROTECCIÓN FACIAL


PROTECTOR FACIAL CRONOS

ÍNDICE

CONTENIDO

SKU	01
ESPAÑOL	
Características	02
Instrucciones de montaje y ajuste	02
Instrucciones de limpieza	02
Certificaciones	03

SKU

904371	Protector Facial Cronos	 Argentina
--------	-------------------------	---

CARACTERÍSTICAS

- Máscara protectora transparente con tratamiento Antiempañó que ofrece protección desde la frente hasta el mentón y permite una excelente visibilidad.
- Reutilizable y de fácil limpieza.
- Montura cómoda de usar y diseño elegante.
- Clips integrados para fijar a pantalla facial.
- Cómodo de llevar facial ultraligero.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

ADVERTENCIAS

1. Esta fabricado con materiales de los que no se espera no causen efectos adversos a la salud. Sin embargo el contacto con la piel del usuario podría provocar alergias en individuos con alta sensibilidad.
2. Si el protector esta dañado deberá ser desechado y reemplazado.
3. Si el protector se daña durante el uso abandone inmediatamente el área de riesgo y reemplácelo.
4. No modifique ni intente reparar este producto.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Se recomienda la limpieza luego de cada uso con agua corriente tibia y jabón neutro o una solución de limpieza especificada para lentes. No utilice fluidos desengrasantes o clorados ni solventes.
2. Para desinfectar utilice una solución de 20mL de hipoclorito de sodio en 10 L de agua y un paño suave que no deje residuos.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

ALMACENAMIENTO

1. Se recomienda guardar el protector en un lugar limpio y seco. Debe protegerse de temperaturas y humedad extremas luz solar directa polvo u otras sustancias que puedan dañar el producto.
Temperatura de almacenamiento: 5°C a 50°C - Humedad máxima de almacenamiento: <80°C.

CERTIFICACIONES