



 PROTECCIÓN FACIAL

## **PROTECTOR FACIAL CRONOS KIDS**

---

# ÍNDICE

## CONTENIDO

<b>SKU</b> .....	01
<b>ESPAÑOL</b>	
Características .....	02
Instrucciones de montaje y ajuste .....	02
Instrucciones de limpieza .....	02
Certificaciones .....	03

**SKU**

904521

Protector Facial Cronos Kids

 Argentina

## CARACTERÍSTICAS

- Máscara protectora transparente con tratamiento Antiempañó que ofrece protección desde la frente hasta el mentón y permite una excelente visibilidad.
- Reutilizable y de fácil limpieza.
- Montura cómoda de usar y diseño elegante.
- Clips integrados para fijar a pantalla facial.
- Cómodo de llevar facial ultraligero.
- Modelo Kids.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

### ADVERTENCIAS

1. Esta fabricado con materiales de los que no se espera no causen efectos adversos a la salud. Sin embargo el contacto con la piel del usuario podría provocar alergias en individuos con alta sensibilidad.
2. Si el protector esta dañado deberá ser desechado y reemplazado.
3. Si el protector se daña durante el uso abandone inmediatamente el área de riesgo y reemplácelo.
4. No modifique ni intente reparar este producto.

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Se recomienda la limpieza luego de cada uso con agua corriente tibia y jabón neutro o una solución de limpieza especificada para lentes. No utilice fluidos desengrasantes o clorados ni solventes.
2. Para desinfectar utilice una solución de 20mL de hipoclorito de sodio en 10 L de agua y un paño suave que no deje residuos.

## **INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA**

### **ALMACENAMIENTO**

1. Se recomienda guardar el protector en un lugar limpio y seco. Debe protegerse de temperaturas y humedad extremas luz solar directa polvo u otras sustancias que puedan dañar el producto.  
Temperatura de almacenamiento: 5°C a 50°C - Humedad máxima de almacenamiento: <80°C.

## **CERTIFICACIONES**